

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ JMDN コード：35768000

再使用禁止**インプラント NiTi ブラシ**


【禁忌・禁止】
再使用禁止。

【保管方法及び有効期間等】

高温多湿、直射日光を避けて保管すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記外観写真の通り

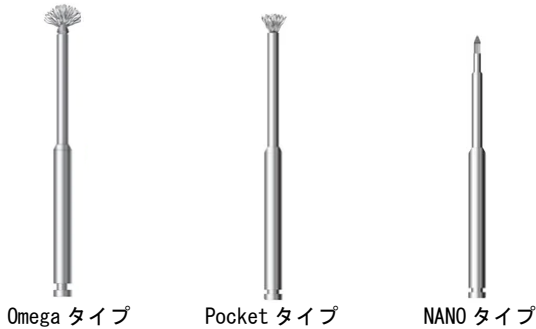

2. 原材料
ブラシ部：ニッケルチタン合金
シャंक部：ステンレススチール

3. 包装
4 本 / 包

【使用目的又は効果】

本品は歯科医師及び歯科衛生士が使用することを目的とし、インプラント表面の清掃に用いる。

【使用方法等】**【使用方法】**

- 使用前に本品が滅菌済かを確認すること。（オートクレーブ滅菌可。135℃で 15 分。）
- 歯科用コントラアングルハンドピースに装着する。
- 口腔外で試運転を行い、確実に装着されていることを確認する。
- インプラントフィクスチャーの溝に本品ブラシ部をあて、十分な注水のもとで清掃を行う。
※推奨回転数：600～1,200rpm
※最大回転数：1,200rpm

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 必ず注水を行いながら使用すること。
- 使用の際、無理な力を加えないこと。
- 最大回転数を超過して使用しないこと。

【使用上の注意】

- 本品は、非滅菌製品のため、使用前に必ず滅菌を行うこと。
また、滅菌後は再包装や再保管をしないこと。
- ニッケル及びチタニウムに対し、湿疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し医師の診断を受けること。
- 同一患者に対し、1 本のブラシで複数のインプラントを清掃する場合は、別のフィクスチャーを清掃する前に、3%の過酸化水素水ですすぐこと。
- 劣化や異常が見られた場合は、直ちに使用を中止すること。
- 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：HANS Korea Co., Ltd. （ハンズコリア社）
製造国：大韓民国