

**2024 年 1 月改訂（第 5 版）
*2023 年 6 月改訂（第 4 版）

届出番号：17B2X10001001750

医療用品（04）整形用品
一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材 JMDN コード：11751000
（一般医療機器 手術用被覆・保護材 JMDN コード：34654000）

再使用禁止

オーラ エイド

【禁忌・禁止】
再使用禁止。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

**【形状、構造及び原理等】

- 形状・構造
 - レクタングル
パッドサイズ：25 mm × 15 mm
50 mm × 15 mm
 - ラウンド小
パッドサイズ：φ12 mm

製造業者：TBM Corporation
（ティービーエムコーポレーション）
製造国：大韓民国

- 包装
レクタングル：20 枚 / 包
ラウンド小：10 枚 / 包

【使用目的又は効果】

口腔内粘膜の創傷又は術後創傷を一時的に被覆、保護するために用いる。

*【使用方法等】

- 創面を消毒液、または生理食塩水で洗浄する。
- 外装を開封し、本品を取り出す。
- 必要に応じ、適当な大きさ形状にカットする。
- 創面の水分をガーゼ等で取り除く。
- 保護フィルムからパッドを剥がし、創面にあわせて貼り付ける。
- 軽く 5～10 秒押し付け密着させる。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- ・ 24 時間以上使用しないこと。
- ・ 出血量の多い創傷には使用しないこと。

*【使用上の注意】

- 本品の使用中に腫れや過敏症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し医師の診断を受けさせること。
- 24 時間以上使用しないこと。
- 出血量の多い創傷には使用しないこと。
- 12 歳未満の子供には使用しないこと。
- 使用前に本品に汚染や損傷がないかを確認し、これらが確認された場合は使用しないこと。
- 創傷部から本品を無理に剥がさないこと。
- 誤飲防止のため、就寝前に本品を取り外すこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

直射日光や高温多湿を避け、1～35℃の清潔な場所で保管すること。

[使用期限]

包装に記載されている使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）