

再使用禁止

PMカップブラシ

【禁忌・禁止】
再使用禁止

* **【形状、構造及び原理等】**

1. 外観
CA用



タイプ：ハード(ホワイト)、ソフト(クリア)

2. 原材料

柄部：真鍮（ニッケルメッキ）
ブラシ部：ナイロン

3. 包装

100本 / 箱

【使用目的又は効果】

歯の清掃と研磨を行うために用いる。

【使用方法等】

1. 本品を歯科用ハンドピースに取り付ける。
2. 歯面研磨用ペーストを適量塗布する。
3. 本品を歯全体に軽く押し当てて研磨する。
※最大回転数：7,000rpm

【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. あらかじめ、患者の口腔外で回転させ、回転不良やぶれがないことを確認してから使用すること。
2. 最大回転数を超えて使用しないこと。
3. 使用に関しては無理な力を加えないこと。（無理な力を加えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つける恐れがある。）
4. 使用に関しては、プロフィーブラシを歯面にあてた後、回転させること。口腔外で回転させると研磨ペーストが飛び散ることがあるので注意すること。
5. 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡などを使用すること。
6. シャンク部（軸部）を確実に最後まで挿入し、半チャックになっていないことを確認すること。

【使用上の注意】

1. 本製品の原材料に対し発疹などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. 本品に使用された材料により、感作又はアレルギー反応が現れる可能性があるため、患者に異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
3. 本品に適合しない歯科用ハンドピースには使用しないこと。
4. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
5. 使用後は、交差感染を防ぐため別の患者には使用せず、必ず廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿を避け、塵や埃のない清潔な場所に保管すること。
2. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に、破損、ヒビ、キズ及び腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号：076-278-8800