

機械器具（65）歯科用充填器
一般医療機器 歯科用根管プラグ JMDN コード：41876000

SANI コンデンサー

【禁忌・禁止】

本品に使用された材料により、感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品の原材料に対してアレルギーの既往歴のある患者には使用しないこと。

*【形状・構造及び原理等】

1. 外観



色調(チップ)：グレー、イエロー、ブルー

2. 原材料

把持部：アルミニウム

作業部：ニッケルチタン合金 / ステンレススチール

3. 包装

1 本 / 包

【使用目的又は効果】

根管内に充填物を充填するために用いる。

【使用方法等】

- 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程含む 134℃以下厳守。)
- 使用用途に応じて適切なサイズの本品を選択し、充填物を根管に充填する。

【使用上の注意】

- 本品に使用された材料により感作又はアレルギー反応が現れる可能性があるため、患者に異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
- 使用前に必ず【保守・点検に係る事項】に従って、洗浄・滅菌・消毒を行うこと。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食する（錆びる）ことがある。
- 劣化や以上が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 洗浄・滅菌について

〔洗浄〕

- 使用後歯科用防腐洗浄液を用いて、洗浄すること。血液体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
- ※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
- ※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

〔滅菌〕

- オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 134℃】
- ※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

〔その他〕

- 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Chengdu Sani Medical

Equipment Co., Ltd

（チェンドウ サニ メディカル エクイップメント社）

製造国：中華人民共和国