

歯科材料（08）歯科用石こう及び石膏製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 JMDNコード：34811000

ODS レジン モデル

【禁忌・禁止】

本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号：076-278-8800

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

性状：液体

色調：キャラメル色

2. 原材料

エトキシ化ビスフェノールAジメタクリレート、その他

製造業者：ODS Co., Ltd.（オーディーエス社）

製造国：大韓民国

【使用目的又は効果】

歯科用模型作製及び修復物材料の作製過程で用いる。

【使用方法等】

- 使用前に本品容器を5分程よく振る。
- 3Dプリンター*1の使用書に従い本品をセットし、造形を開始する。*1 波長UV：405nm
- 造形後、出力された造形物を取り外す。
- イソプロピルアルコール（IPA96%以上）を使用して超音波洗浄を行い、未硬化層を除去する。
- 造形物を乾燥させる。
- 二次硬化を行う。
「ODS キュアボックス（届出番号：17B2X10001001835）」の使用を推奨する。

【使用上の注意】

- 使用の際は、保護眼鏡と手袋（ニトリル製）を着用すること。
- 本品は可燃性であるため、火気の近くで使用しないこと。
- 換気の良い場所で使用すること。
- 使用後は直ちに蓋を閉めること。
- 他の製品と混用しないこと。

[重要な基本的注意]

- 本品の使用により、発疹等の過敏反応が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 皮膚に付着した場合は、すぐに多量の水で20分以上洗い流し、専門医の診断を受けること。
- 万一、目に入った場合は、すぐに多量の流水で20分以上洗い流し、専門医の診断を受けること。
- 吸引した場合は、風通しの良い新鮮な空気の場所に移動し安静にすること。症状が改善しない場合は、医師の診断を受けること。

[その他の注意]

- 本品を使用する場所には、消火器具を備えること。
- 破棄する際は、地方自治体の条例または規則に従うこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

20℃以下の乾燥した暗所で保管すること。

[使用期限]

包装に記載の使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）