

機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN コード：31776000
（一般医療機器 単回使用歯科用吸引カニューレ JMDN コード：37434000）

再使用禁止

サクシヨンミラー+チューブ

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1


電話番号：076-278-8800

製造業者：Garner Industries（ガーナー社）

製造国：アメリカ合衆国

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

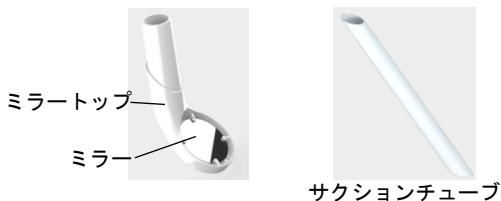

2. 原材料

高密度ポリエチレン

3. 包装

ミラーヘッド、サクシヨンチューブ 各 50 個

【使用目的又は効果】

口腔内診査又は圧排を行うと同時に、貯留する水分や切削片の除去に用いる。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. ミラーヘッドにサクシヨンチューブを確実に取り付ける。
2. サクシヨンチューブは吸引器具に装着する。
3. 吸引を行いながら、口腔内診査を行う。

【使用上の注意】

1. 器具の形状変更や改造はしないこと。
2. 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
3. 子供等の診療・治療においては、開口器等を用いて開口状態を維持すること。本品を噛み、口腔内で破損し、怪我をする恐れがある。
4. 破損等による誤飲の恐れがあるので、以下は行わないこと。
 - ①本品に対する曲げ、切削、加圧等
 - ②粗雑な扱い（キズをつける、落下させる、強い衝撃を与える等）
5. 廃棄の際は、感染防止に留意し関連法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1. 高温多湿を避け、直射日光の当たらない清潔な場所に保管すること。
2. 保管中、破損しないように注意すること。

[使用期限]

包装に記載の使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

【保守・点検に係る事項】

使用前に汚れ、破損、ヒビ、キズ、腐食又はミラー部の曇り等がないかを確認すること。