

機械器具 (64) 歯科用探針
一般医療機器 歯周ポケットプローブ JMDNコード: 31848000
プローブDen L/H

【禁忌・禁止】

本品に使用された材料により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品の原材料に対してアレルギーの既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 外観

代表例: Probe CP 11 10mm handle



種類	深度スケール (mm)
CP 11	3-6-8-11
CP 12	3-6-9-12
UNC15	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

2. 原材料

ステンレススチール

3. 包装

1本 / 包

【使用目的又は効果】

歯周疾患の進行を観察するため、歯周ポケットの深さを測定するために用いる。

【使用方法】

- 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む121℃以下厳守。)
- 適切な種類の器具を選択する。
- 先端部を歯周ポケットに挿入し、深さを測定する。

【使用上の注意】

- 本品に使用された材料により、感作又はアレルギー反応が現れる可能性があるため、患者に異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
- 使用前に必ず【保守・点検に係る事項】に従って、洗浄・消毒・滅菌を行うこと。
- 素材のステンレススチール鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食する(錆びる)ことがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・滅菌について

[洗浄]

・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
※超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
※クレンザー(磨き粉)、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
※先端マーキング部をブラシ、スポンジ等でこすり洗いをしないこと。マーキングが薄くなる場合がある。
※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。(必要に応じて潤滑油を塗布すること。)

[滅菌]

・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程を含む121℃以下厳守。】
※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

[その他]

- 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する(錆びる)ことがある。
 - 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。
- 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル
住所: 石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号: 076-278-8800