

機械器具 (49) 医療用穿刺器、穿刺器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用カーバイドバー JMDN コード:16668000

SANI カーバイドバーロングネック

【禁忌・禁止】

本品に使用された材料により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品の原材料に対してアレルギーの既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観

[CA 用]



2. 原材料

軸部: ステンレススチール
作業部: タングステンカーバイド

3. 包装

5 本 / 包

【使用目的又は効果】

歯牙、骨等の硬組織を研削するために用いる。

【使用方法等】

- 使用する前に本品が滅菌済みかを確認すること。
(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守。)
- 歯科用ハンドピース等に装着し、口腔外で試運転を行い、振れないことを確認すること。
- 歯牙、骨等の硬組織の研削を行う。
※推奨回転数: 1,000~1,500rpm 最大回転数: 20,000rpm

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 歯科用ハンドピース等の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- あらかじめ患者の口腔外で回転させ、回転不良やぶれがないことを確認してから使用すること。
- 損傷、変形(錆、表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。
- 指定の最大回転数を超過して使用しないこと。
- 折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度な加圧での使用は避けること。
- 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるため十分に注意すること。

【使用上の注意】

- 本品に使用された材料により、感作又はアレルギー反応が現れる可能性があるため、患者に異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
- 使用前に必ず[保守・点検に係る事項]に従って、洗浄・消毒・滅菌を行うこと。
- 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒートテグを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食する(錆びる)ことがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保管・点検に係る事項】

1. 洗浄・滅菌について

【洗浄】

- 使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて洗浄すること。血液、体液等で感染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
- ※超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- ※クレンザー(磨き粉)、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

【滅菌】

- オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程を含む 134℃以下厳守。】
- ※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

【その他】

- 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する(錆びる)ことがある。
- 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

- 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社歯愛メディカル
住所: 石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者: Chengdu Sani Medical
Equipment Co., Ltd
(チェンドウ サニ メディカル エクイップメント社)
製造国: 中華人民共和国