


機械器具（25） 医療用鏡

一般医療機器 歯鏡 JMDN コード：31776000
(一般医療機器 汎用歯科用照明器 JMDN コード：12351000)

LED デンタルミラー

【形状、構造及び原理等】

1. 外観

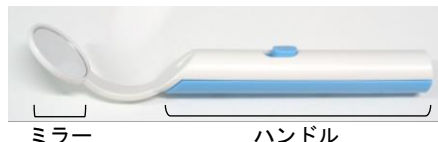

2. 原材料

ハンドル：ABS 樹脂
ミラー：ポリカーボネート

3. 電氣的定格

- ・電源：アルカリボタン電池 LR44 3 個
※別売
- ・電源電圧：DC4.5V
- ・光源：白色 LED
- ・照度：8~10LUX

4. 包装


1 セット / 箱
セット内容：本体、交換用ミラーフィルム 2 枚、ドライバー

【使用目的又は効果】

口腔内の診査に用いる。

【使用方法等】

1. 使用する前に本品が消毒済みかどうか確認すること。(オートクレーブ滅菌不可。アルコール消毒液を含ませた柔らかい布等で清拭すること。)
2. 本品背面のネジを付属のドライバーで外し、電池の向きに注意してアルカリボタン電池(別売)をセットする。
3. ミラーのハンドル部を把持し、口腔内を診査する。必要に応じてハンドル部の電源ボタンを ON にし、ライトを点灯させる。電源ボタンを OFF にするとライトが消灯する。(下図参照)

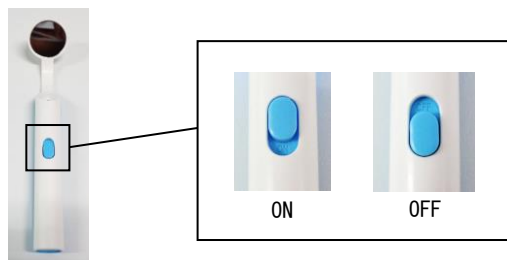

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず【保守・点検に係る事項】に従って、消毒を行うこと。
2. 使用前にライトの電源ボタンが正常に作動するか確認すること。
3. 濡れた手で電池の脱着を行わないこと。

4. 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
5. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
6. 子供等の診療・治療時においては、開口器等を用いて開口状態を維持すること。本品を噛み、口腔内で破損し、怪我をするおそれがある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 水のかからない場所に保管すること。
2. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前に汚れ、破損、ヒビ、キズ、腐食又はミラー一部の曇り等がないか点検すること。これらが確認された場合は使用しないこと。
2. しばらく使用しなかった本器を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常に、かつ安全に作動することを確認すること。
3. 洗浄・消毒について

[洗浄]

使用後は、ミラー部分のみ、水を含ませた柔らかい布等で汚れを拭き取ること。
※ハンドルは、水に濡らしたり液体に浸したりしないこと。
※クレンザー(磨き粉)、金ブラシ、金属ウールはキズの原因となるので使用しないこと。
※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥させること。

[消毒]

使用前使用後は、アルコールを含ませた柔らかい布等で表面を拭き取り、消毒すること。(オートクレーブ滅菌不可)

[その他]

- ・洗浄にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
- ・洗浄・消毒後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると変色の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Hangzhou Zhengxing Medical Apparatus Co., Ltd.
(ハンゾウ ジェンシング メディカル アパラス社)
製造国：中華人民共和国