


機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN コード：31776000

フリップミラー

【形状、構造及び原理等】

1. 外観

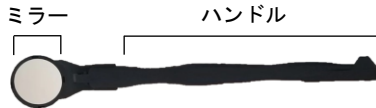

2. 原材料

ハンドル：ポリプロピレン

ミラー：ガラス

3. 包装

1 本 / 包

【使用目的又は効果】

口腔内診査を行うために用いる。

【使用方法等】

- 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。
(オートクレーブ滅菌可。121℃、20 分以下厳守。)
- ハンドル部を把持し、口腔内を診査する。必要に応じて、ミラーの角度を 35 度もしくは 90 度に切り替え、診査を行う。
(下図参照)



【使用上の注意】

- 使用前に必ず【保守・点検に係る事項】に従って、洗浄・消毒・滅菌を行うこと。
- 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒートリングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 子供等の診療・治療時においては、開口器を用いて開口状態を維持すること。本品を噛み、口腔内で破損し、怪我をするおそれがある。
- 破折時による誤飲のおそれがあるので、以下は行わないこと。
 - ①本品に対する曲げ・切削・加圧等
 - ②粗雑な扱い(キズをつける・落下させる・強い衝撃を与える等)

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、清潔な乾燥した場所にて保管すること。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 洗浄・滅菌について

[洗浄]

- ・使用後は歯科用洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
- ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは、キズの原因となるので使用しないこと。
- ※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

[滅菌]

- ・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。（オートクレーブ滅菌可。121℃、20 分以下厳守。）
- ※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

[その他]

- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると変色の原因となることがある。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：GlikTech, LLC（クリックテック社）

製造国：アメリカ合衆国