

## 再使用禁止

## ライトキュアリングトレー

## 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は、直接本品に触れないようにすること。

## 【形状、構造及び原理等】

## 1. 外観



## 2. 原材料

アクリレート、フィラー、その他

## 3. 包装

50枚 / 箱

## 【使用目的又は効果】

個人トレー、ベースプレート等の作製に用いる。

## 【使用方法等】

- 通法に従って模型を作製する。
- 模型のアンダーカットをワックスで填塞修正する。
- 印象材のスペースを確保するためワックスで模型全体をブロックアウトする。
- 本品を3.の模型に圧接する。
- 辺縁の余剰部分をトリミングし、辺縁を滑らかに整える。  
使用用途に応じてハンドルをつける。
- 3~5分光重合させる。
- 本品が完全に硬化したら模型から取り外す。  
※重合時間は、有効波長域 UV: 350~400nm, UV/Vis: 420~480nm  
の歯科技工用重合器を使用する場合を前提とする。

## 【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた場合には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 本品の使用により過敏症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けること。
- 重合材料は保存期間ならびに保管条件等により硬化状態が変化することがあるので、適時にサンプル等で硬化を確認し、規定の照射時間で硬化しないものは使用を中止し、廃棄すること。

## 【使用上の注意】

- 開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- 他の製品と混用しないこと。

## 【保管方法及び有効期間】

## [保管方法]

- 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 使用後は地方自治体の法則に則り適切な処分を行うこと。

## [使用期限]

容器に記載されている使用期限までに使用すること。  
(使用期限は自己認証[製造所データ]による。)

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：Shandong Huge Dental Material Corporation

(シャンドン ヒュージ マテリアル コーポレーション)

製造国：中華人民共和国