

再使用禁止

ゲージ付デンタルミラー

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- 1) 形状・構造
外観は以下の通り

本品は寸法の異なる 2 種類があり、ミラー内径はそれぞれ
Φ22mm、Φ24mmである。



- 2) 原材料
本体：PPSU（ポリフェニルスルホン樹脂）
ミラー：ガラス

- 3) 包装
[セット内容]
・ 5 本入り/包

【使用目的又は効果】

本品は口腔内診査又は圧排のために用いる。

【使用方法等】

- 1) 使用前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。
（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守。）
2) 先端ミラー部により、口腔内の診察又は圧排に用いる。

【使用上の注意】

- 1) 患者ごとに【保守・点検に係る事項】に記載する方法及び条件で、点検を行った上で滅菌すること。
2) 小児などに使用する際は、本品を噛む恐れがあるため、開口器等を用いて開口状態を保持すること。
3) 破折等による誤飲のおそれがあるので、以下は行わないこと。
①本品に対する曲げ・切削・加圧等
②粗雑な扱い（キズをつける・落下させる・強い衝撃を与える等）

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
2) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前に汚れ、破損、ヒビ、キズ、腐食又はミラー部の曇り等がないか点検すること。これらが確認された場合は使用しないこと。
2) 本品は未滅菌のため、以下の方法及び条件で、滅菌すること。
・ オートクレーブ等で滅菌を行うこと。
滅菌条件は 121℃で 15 分以上、又は 134℃で 3 分以上。
・ 滅菌後に急冷しないこと。
・ 乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Foshan Ruibang Xinsheng Medical Instrument Co., Ltd
（フォーシャン ルイバァン シンシャン
メディカル インストルメンツ社）
製造国：中華人民共和国