

歯科材料（09）歯科用研削材料  
一般医療機器 歯磨カップ JMDN コード：16184000

再使用禁止

ポリシングカップ D e n

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観

1) CA 用



2) スクリュー用



2. 原材料

作業部：シリコン

シャンク部：真鍮（ニッケルメッキ）

【使用上の注意】

1. 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し専門医の診断を受けさせること。
2. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学薬品を避け、清潔な場所で保管すること。
2. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Guangzhou Jaan Medical Co., Ltd.

（グアンジョウ ジャアン メディカル社）

製造国：中華人民共和国

【使用目的又は効果】

歯科用ハンドピースに取り付けて、歯に研磨材を適用するために用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

1. 処置部位に応じた本品を選択し、歯科用電気駆動装置等に取り付ける。
2. 本品に研磨ペーストを適量塗布する。
3. 歯全体に本品を軽く押し付けて研磨する。  
※推奨回転数：5,000～7,000rpm  
※最大回転数：15,000rpm

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・使用前に試運転を行い、振れ等がないことを確認すること。
- ・指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- ・歯科用電気駆動装置等の取扱説明書に従い、本品を確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ・本品を歯にあてた後に回転させること。歯にあてずに回転させると研磨ペーストが飛び散ることがあるので注意すること。
- ・研磨時の摩擦熱により作業部が劣化することがあるので、過度の加圧や回転速度での連続的な使用は避けること。
- ・安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- ・作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- ・本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるため十分に注意すること。
- ・使用後は必ず破棄すること。