

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ JMDN コード：35768000

再使用禁止

ミニポリシングブラシ D e n

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観
CA 用



2. 原材料
作業部：ナイロン
シャंक部：真鍮（ニッケルメッキ）

【使用目的又は効果】

ブラシを備えた回転式歯科用器具で、歯の清掃と研磨に用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

1. 処置部位に応じた本品を選択し、歯科用電気駆動装置等に
取り付ける。
2. 本品に研磨ペーストを適量塗布する。
3. 歯全体に本品を軽く押し付けて研磨する。
※推奨回転数：5,000～7,000rpm
※最大回転数：15,000rpm

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・使用前に試運転を行い、振れ等がないことを確認すること。
- ・指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- ・歯科用電気駆動装置等の取扱説明書に従い、本品を確実に奥
まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは
使用しないこと。
- ・本品を歯にあてた後に回転させること。歯にあてずに回転さ
せると研磨ペーストが飛び散ることがあるので注意すること。
- ・安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- ・作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、
破損疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- ・本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性
があるので十分に注意すること。
- ・使用後は必ず破棄すること。

【使用上の注意】

1. 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた場合
は、直ちに使用を中止し専門医の診断を受けさせること。
2. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒー
ティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わない
こと。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学薬品を避け、清潔な場所で保管すること。
2. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食
等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止する
こと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Guangzhou Jaan Medical Co., Ltd.
（グアンジョウ ジャアン メディカル社）
製造国：中華人民共和国