

機械器具（66）歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 JMDN コード：70682000

スマートオートミキサー

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



2. 原材料

本体：ポリアミド（PA）、鉛
プランジャー：アルミニウム合金

3. 仕様

定格電圧：7.4VDC
バッテリー：リチウムイオン電池
電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器
電撃に対する保護の程度による分類：B 形装着部

【使用目的又は効果】

カートリッジ式歯科用印象材料の練和に用いる。

【使用方法等】

【使用前の準備】

- 使用前に取扱説明書をよく読むこと。
- 初回使用前に十分に充電を行うこと。

【使用方法】

- ロック解除ボタンを押しながら、プランジャーを奥まで引く。
- 印象材カートリッジ（別売）をしっかりとセットする。
- スイッチボタンを長押しすると印象材が吐出される。

【使用後】

スイッチボタンを放すと停止する。

【使用環境】

温度：-15～50℃
湿度：0～90%（結露なきこと）

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 練和時には、カートリッジとミキシングチップが確実に装着されていることを確認してから、印象材を押し出すこと。
- カートリッジに関する取扱い方法等については、装填する歯科材料の添付文書に従うこと。

【使用上の注意】

- バッテリーからの液漏れ、本体の部分的な変色、変形などの異常がみられる場合は使用を中止すること。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 漏電や損傷を防ぐ為、金属性もしくは水分を含んだものに接続口が触れないようにすること。
- バッテリーが破損する恐れがあるため、完全に充電がなくなった状態で保管しないこと。
- 付属の充電用ケーブル以外は使用しないこと。
- 異常や異音等を確認した場合は、直ちに使用を中止すること。
- 充電用ケーブルに過度な力を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 高温多湿、直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。
- 水のかからない場所に保管すること。
- オートクレーブ滅菌不可。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

※詳細については取扱説明書の保守・点検の項を必ず読むこと。

- 必ず定期点検を行なうこと。
- しばらく使用しなかった機器を再使用する際には、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。
- 機器の分解・改造はしないこと。
- 故障した場合は、直ちに製造元若しくは製造販売元へ連絡を行い修理すること。
- 機器は次の使用に支障のないよう必ず清浄にしておくこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Sherpa Korea（シェルパ코리아社）
製造国：大韓民国