


機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDNコード：31776000

フォグクリアミラー

【形状、構造及び原理等】

1. 外観

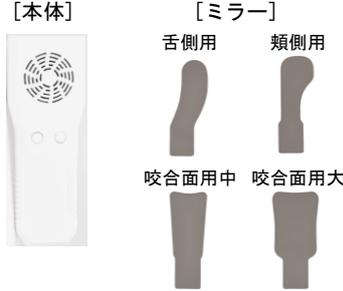

2. 原材料

ミラー：ステンレススチール

3. 包装

1セット / 箱

セット内容：本体、ミラー4種、USB充電ケーブル

【使用目的又は効果】

本品は口腔内診査のために用いる。

【使用方法等】

- 使用前にミラーが滅菌済みであることを確認する。
ミラーのみオートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む135℃以下。
- ミラーを本体にセットし、口腔内の診査を行う。
必要に応じて、図1の②を押し、送風を行う。
もしくは、図1の①を押し、送風及びミラー部の照明を行う。
- 使用後はミラーを本体から取り外し、【保守・点検に係る事項】に従って洗浄、消毒、滅菌を行う。

図1



【使用上の注意】

- 使用前、使用後は必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 本品を用いた処置により発疹、皮膚炎などの過敏症状又はアレルギー症状が現れた患者には、使用を中止し医師の診断を受けさせること。

- 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- 誤って患者が本品を噛まないように開口器等を用いて開口状態を保持すること。
- 充電の際は、本品に付属するUSB充電ケーブルを使用すること。
- 鏡面は傷つきやすいため粗雑な扱いを避け、取扱には注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、清潔で乾燥した場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前・使用後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 洗浄・滅菌について

【洗浄】

使用後は歯科用防腐洗浄液を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

【滅菌】

ミラーのみオートクレーブ滅菌可。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む135℃以下厳守】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

【その他】

・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。

・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：Foshan Ruibang Xincheng Medical Instrument Co., Ltd
（フォーシャン ルイバン シンシャン メディカル インストルメント社）

製造国：中華人民共和国