

F a b ジンジバレジン

【形状、構造及び原理等】

1. 外観

性状：液体

色調：ピンク透明



2. 原材料

重合ウレタンアクリレート、アクリル酸 5-エチル-1,3-ジオキサン-5-イルメチル、他

【使用目的又は効果】

歯科用模型及び修復物の作製過程に用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

- 使用前に本品をよく振り、併用する 3D プリンターの取扱説明書に従ってセットし、造形を行う。
- 造形終了後、3D プリンターから取り出し、イソプロピルアルコール（IPA95%以上）を使用して超音波洗浄を行い、未硬化層を除去する。
- 洗浄後、エアーにより乾燥させる。
- 歯科用光重合器を用い、造形物を二次硬化させる。
- 造形物の最終形態調整を行う。

[使用環境条件]

20～30℃

【使用上の注意】

- 使用の際は、硬化後まで手袋（ニトリル製）を着用し、本品およびポストキュア前の造形物には直接触れないこと。
- 本品は可燃性であるため、火気の近くで使用しないこと。
- 換気の良い場所で使用すること。
- 使用後は直ちに蓋を閉めること。
- 他の製品と混用しないこと。

[重要な基本的注意]

- 本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症状の既往歴がある術者は使用しないこと。
- 本品の使用により、発疹等の過敏反応が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 皮膚に付着した場合は、すぐに石けんと流水で洗い流すこと。専門医の診断を受けること。
- 万一、目に入った場合は、すぐに多量の水で 15 分以上洗い流し、専門医の診断を受けること。
- 吸引した場合は、風通しの良い新鮮な空気のある場所に移動し安静にすること。症状が改善しない場合は、医師の診断を受けること。

[その他の注意]

- 本品を使用する場所には、消火器具を備えること。
- 破棄する際は、地方自治体の条例または規則に従うこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 高温多湿を避け、直射日光が当たらない 5～35℃の場所で保管すること。
- わずかな光でも重合が誘発されるため、光を避けること。
- 容器の密閉状態を保つこと。
- 出力した造形物を保管する時は、不透明または琥珀色の密閉容器に保管すること。
- 火気の近くに保管しないこと。
- 長期間保管すると内容物が沈殿する場合があります。使用前に手または超音波装置でよく振ってからご使用ください。

[使用期限]

包装に記載の使用期限（製造日から 2 年）までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Shining 3D Tech Co., Ltd.

（シャイニング スリーディーテック社）

製造国：中華人民共和国