

歯科材料（08）歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 JMDN コード：34811000

F a b デンタルモデルレジン（グレー）

【形状、構造及び原理等】

1. 外観
性状：液体
色調：グレー



2. 原材料
重合ウレタンアクリレート、エトキシ化ビスフェノール A ジ
メタクリレート、他
3. 包装
1L / 容器

【使用目的又は効果】

歯科用模型作製及び修復物材料の作製過程で用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 使用前に本品をよく振り、併用する 3D プリンターの取扱説明書に従ってセットし、造形を行う。
- 造形終了後、3D プリンターから取り出し、イソプロピルアルコール（IPA95%以上）を使用して超音波洗浄を行い、未硬化層を除去する。
- 洗浄後、エアーにより乾燥させる。
- 歯科用光重合器を用い、造形物を二次硬化させる。
- 造形物の最終形態調整を行う。

〔使用環境条件〕

20～30℃

【使用上の注意】

- 使用の際は、一般作業用の白衣と手袋（ラテックス製）を着用し、本品およびポストキュア前の造形物には直接触れないこと。
- 換気の良い場所で使用すること。
- 使用後は直ちに蓋を閉めること。
- 樹脂が入っている容器は、中の成分が分離しないように定期的に振ること。
- 他の製品と混用しないこと。

〔重要な基本的注意〕

- 本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症状の既往歴がある術者は使用しないこと。
- 本品の使用により、発疹等の過敏反応が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 皮膚に付着した場合は、すぐに石けんと流水で洗い流すこと。専門医の診断を受けること。
- 万一、目に入った場合は、すぐに多量の水で 15 分以上洗い流し、専門医の診断を受けること。
- 吸引した場合は、風通しの良い新鮮な空気の場所に移動し安静にすること。症状が改善しない場合は、医師の診断を受けること。

〔その他の注意〕

- 本品を使用する場所には、消火器具を備えること。
- 破棄する際は、地方自治体の条例または規則に従うこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 高温多湿を避け、直射日光が当たらない 5～35℃の場所で保管すること。
- わずかな光でも重合が誘発されるため、光を避けること。
- 容器の密閉状態を保つこと。
- 出力した造形物を保管する時は、不透明または琥珀色の密閉容器に保管すること。
- 火気の近くに保管しないこと。
- 長期間保管すると内容物が沈殿する場合があります。使用前に手または超音波装置でよく振ってからご使用ください。

〔使用期限〕

包装に記載の使用期限（製造日から 2 年）までに使用すること。
（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Shining 3D Tech Co., Ltd.
（シャイニング スリーディーテック社）
製造国：中華人民共和国