

機械器具（25） 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN コード：31776000

再使用禁止

キャラミラー

【禁忌・禁止】
再使用禁止。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



2. 原材料

ミラー：ガラス
ハンドル：ポリプロピレン樹脂（PP 樹脂）
ハンドルトップ：ポリ塩化ビニル（PVC）

3. 包装

20 本/包

【使用目的又は効果】

口腔内診査又は圧排に用いる。

【使用方法等】

ハンドル部を把持し、ミラー部により口腔内を診査又は圧排する。付属のハンドルトップは取り外しができる。

【使用上の注意】

- 器具の形状変更や改造はしないこと。
- 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
- 子供等の診療・治療時には、開口状態を維持すること。
本品を噛み、口腔内で破損すると怪我をする恐れがある。
- 破折等による誤飲の恐れがあるため、以下は行わないこと。
 - 本品に対する曲げ、切削、加圧等
 - 粗雑な扱い（キズをつける、落下させる、強い衝撃を与える等）
- 使用後は必ず破棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない清潔な場所に保管すること。
- 保管中、破損しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に破損、ヒビ、先端及び柄部に傷がない確認し、これらがある場合は使用を中止すること。