

機械器具（69）歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置 JMDN コード：35761000

F a b キュア 2


【禁忌・禁止】

目を損傷させる恐れがあるため、光源を直視しないこと。


【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

1) 正面

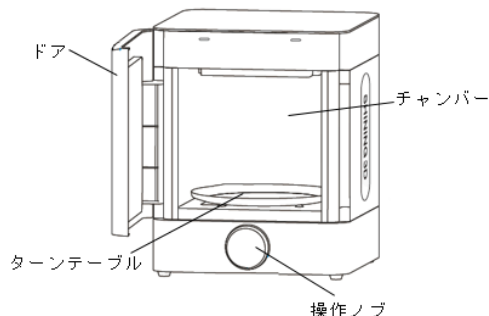

2) 背面下部

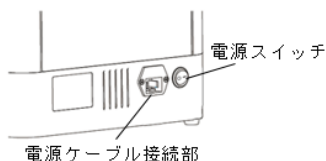

2. 仕様

サイズ：290 mm (W) × 290 mm (D) × 367.5 mm (H)

重量：8.2 kg

硬化サイズ：最大φ210×180 mm

光源：UV LED

LED 出力：70W

波長：385～405nm

定格電圧：AC 100～240V

消費電力：150W

周波数：50/60Hz

インターフェース：Wi-Fi

電撃に対する保護の形式：クラス I 機器

【使用上の注意】

1. 異音、異臭など異常を確認した場合は、使用を中止すること。
2. チャンバー内に樹脂が残っている場合はアルコール等で拭き取り、必ず使用前に取り除くこと。
3. 本品の冷却ファンを塞がないこと。
4. 2 時間連続作業を行った場合、必ず 15 分間冷却すること。
5. 直射日光を避け、換気の良い場所に設置すること。
6. 可燃性物質、揮発性の溶剤がある場所では使用しないこと。
7. 本品に過度な力や衝撃を与えないこと。
8. 電源コードに過度な力を加えたり、破損させないこと。
9. 機器の分解、改造をしないこと。
10. チャンバー内の清掃を行う際は、必ず電源スイッチをオフにして電源コードを抜いてから行うこと。
11. 本品外装は、柔らかい布で清拭すること。
12. 清掃の際、洗剤は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 水のかからない、風通しの良い場所に保管すること。
2. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
3. 傾斜、振動、衝撃など安定状態に注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 取扱説明書に従い、使用前に点検を行うこと。
2. 必ず定期点検を行うこと。
3. しばらく使用のない本品を再度使用する際は、使用前に必ず性状かつ安全に作動することを確認すること。
4. 故障した場合は、直ちに製造販売元へ連絡すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Shining 3D Tech Co., Ltd.

（シャイニング スリーディーテック社）

製造国：中華人民共和国

【使用目的又は効果】

歯科技工室で高分子材料を重合するために用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

取扱説明書に従って本品を水平な場所に設置し、樹脂の重合を行う。

〔使用環境〕

温度：10～30℃

湿度：30～70%

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ・ チャンバー内に液体、金属片や導電性の異物があると、故障や感電、火災の恐れがあるため、使用前に取り除くこと。
- ・ 濡れた手で操作しないこと。