

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ JMDN コード：35768000

再使用禁止（ブラシ、シリンジ及びシリンジチューブ）


ジンジクリーナー

【禁忌・禁止】

1. ブラシ、シリンジ及びシリンジチューブは再使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1) 外観

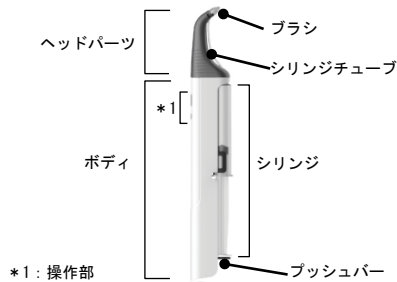

2) 原材料

ブラシ：ナイロン、ステンレス、ポリプロピレン

3) 包装

1 セット / 箱

セット内容：本体、ブラシ、シリンジ、シリンジチューブ、充電アダプタ

【使用目的又は効果】

本品は歯科治療時に歯牙等の清掃に用いる。

【使用方法等】

【使用前の準備】

※使用前に必ず取扱説明書をよく読むこと。


- 1) 充電残量を確認し、十分に充電を行う。
- 2) 【保守・点検に係る事項】に従って、適切な洗浄、消毒、滅菌を行う。ヘッドパーツのみオートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 135℃以下。
- 3) 取扱説明書に従って、シリンジにシリンジチューブを装着し、本体に取り付けヘッドパーツ先端にブラシを装着する。
- 4) シリンジに洗浄液を充填する。

【使用方法】

図 1 の①を押し、作業を開始する。

適宜、パワーの強弱を図 1 の①を押し、選択する。パワーの強弱によって、図 1 の③が赤（強）から緑（弱）に替わる。

図 1

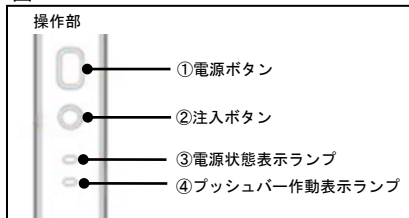

【使用後】

ヘッドパーツ、ブラシ、シリンジ及びシリンジチューブを本体から取り外し、【保守・点検に係る事項】に従って適切な洗浄、消毒、滅菌を行う。

【使用環境】

温度：5～40℃

湿度：10～60%（結露なきこと）

【使用上の注意】

- 1) 使用したブラシ、シリンジ及びシリンジチューブは交叉感染を防ぐため、使用後廃棄すること。
- 2) 本品を用いた処置により発疹、皮膚炎などの過敏症状又はアレルギー症状が現れた患者には、直ちに使用を中止し医師の診断を受けさせること。
- 3) 使用前、使用後は必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 4) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 5) 劣化や異常が見られた場合は、直ちに使用を中止すること。
- 6) 充電の際は、本品に付属する充電ケーブルを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿、直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

※詳細は取扱説明書を参照すること。

- 1) 使用前・使用後は破損やキズ等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

2) 洗浄・滅菌について

【洗浄】

使用後は歯科用洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

【滅菌】

ヘッドパーツのみオートクレーブ滅菌可。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 135℃以下】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

【その他】

- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：DMS Co., Ltd.（ディーエムエス社）

製造国：大韓民国