

EASYゼックリアバー

*【形状、構造及び原理等】

1. 外観
[FG 用]



2. 原材料
タングステンカーバイド

3. 包装
各 6 本 / 包

【使用目的又は効果】

歯科用電気駆動装置等に装着し、歯牙、骨等の硬組織を研削するために用いる。金属、プラスチック、陶材、又は同様の材料の研削に用いることもできる。

【使用方法等】

【使用方法】

1. 使用する前に本品が滅菌済みであることを確認する。(オートクレーブ温度は乾燥工程を含む、134℃)。
2. 歯科用ハンドピースに装着し口腔外で試運転を行い、振れがないことを確認する。
3. 以下の回転速度に従って歯牙、骨等の硬組織の研削を行う。
※最大回転数：150,000/rpm
※推奨回転数：120,000～150,000/rpm

【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 歯科用ハンドピースの取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
2. あらかじめ患者の口腔外で回転させ、回転不良やぶれがないことを確認してから使用すること。
3. 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
4. 指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
5. 折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度な加圧での使用は避けること。
6. 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
7. 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
8. 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。

【使用上の注意】

1. 本品に使用された材料により、感作又はアレルギー反応が現れる可能性があるため、患者に異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
2. 使用前に必ず【保守・点検に係る事項】に従って、洗浄・消毒・滅菌を行うこと。
3. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
4. 本品に用いた原材料は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食する（錆びる）ことがある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保管・点検に係る事項】

1. 洗浄・滅菌について

【洗浄】

- ・ 使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて洗浄すること。血液、体液等で感染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

【滅菌】

- ・ オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程含む。134℃】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

【その他】

- ・ 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- ・ 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

2. 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地