

## 再使用禁止（ディスプレイカバー）

## モニカム Mini

## 【禁忌・禁止】

ディスプレイカバーは再使用禁止。

## 【形状、構造及び原理等】

## 1. 外観



## 2. 原材料

ABS樹脂

## 3. 仕様

解像度	2.0 megapixels
画像センサー	1080p Full HD CMOS sensor、 1,920×1,080 pixels、 wide-angle lens
焦点距離	10～40mm
ホワイトバランス	オート
光源	6 white LED

電撃に対する保護の形式による分類：クラス II

電撃に対する保護の程度による装着部の分類：B形装着部

## 4. 包装

1セット / 箱

## 【使用目的又は効果】

本品は口腔内の情報をモニターに映し出し、診療、患者への説明等に使用する。

## 【使用方法等】

※取扱説明書をよく読むこと。

## 【使用前の準備】

- 取扱説明書に従い、ソフトウェアを汎用PCにインストールする。

## 【使用方法】

- USBケーブルを介し、本品とソフトをインストールした汎用PCに接続する。
- LEDライトが点灯し、電源が入っていることを確認する。
  - 接続により、本品の電源が入りLEDランプならびにパイロットランプが点灯する。
  - 接続したまま電源をオフした場合は、メインキーを長押しすると電源が入る。
- ディスプレイカバーを装着し、本品を口腔内に挿入する。
- メインキーを押すと画面の画像が静止し、もう一度メインキーを押すと静止画面が解除される。

## 【使用后】

- インキーを長押しして電源をオフにする。
- 使用したディスプレイカバーは破棄すること。

## 【使用環境】

温度：25～35℃  
湿度：15～90%（結露しないこと）

## 【使用上の注意】

- 交差感染を防ぐため、ディスプレイカバーは患者ごとに交換すること。
- 使用中、患者が本品を強く噛まないように注意すること。
- 機器の改造や分解をしないこと落下させるなど強い衝撃を与えないこと。

- 本品のLED照明を患者の目に照射しないこと。また直視しないこと。
- 水のかからない場所に設置すること。
- 直射日光、火気、またはストーブの近くなど、高温になる場所での使用や放置はしないこと。
- 接続は使用方法に従って、正しく行うこと。
- オートクレープ等による滅菌処理をしないこと。
- 漏電や損傷を防ぐ為、金属性もしくは水分を含んだものに接続口が触れないようにすること。
- 機器全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

- 水のかからない場所に保管すること。
- 気圧、温度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響を生ずる恐れのない場所で保管すること。

## 【保管環境】

温度：-20℃～65℃  
湿度：15%～95%（結露なきこと）  
大気圧：700～1,060hPa

## 【保守・点検に係る事項】

- 取扱説明書に従って定期点検を行うこと。
- 長期間使用のない本品を再使用する際は、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
- 故障した場合は、直ちに製造元若しくは製造販売元へ連絡を行い修理すること。
- オートクレープ滅菌不可。
- 取扱説明書に従い、洗浄・消毒を行うこと。
- 表面にホコリや汚れがある場合は、乾いた布や少し湿った布で拭き取る。汚れが取れない場合は、中性洗剤で拭き取ること。（70%イソプロピルアルコール推奨）
- 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル  
住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：MONITEX INDUSTRIAL CO., LTD.  
（モニテックス インダストリアル社）

製造国：台湾