

歯科材料(09) 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ JMDNコード: 35768000

プロフィーブラシDen

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

*【形状、構造及び原理等】

1. 外観

1) CA用



2) スクリュー用



2. 原材料

作業部: ナイロン
シャंक部: 真鍮(ニッケルコーティング)

3. 包装

100個/包

【使用目的又は効果】

歯の清掃と研磨に用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 処置部位に応じた本品を選択し、歯科用電気駆動装置等に
取り付ける。
- 本品に研磨ペーストを適量塗布する。
- 歯牙全体に本品を軽く押し付けて研磨する。
※推奨回転数: 5,000~7,000rpm
※最大回転数: 15,000rpm

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 使用前に試運転を行い、振れ等がないことを確認すること。
- 指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- 歯科用電気駆動装置等の取扱説明書に従い、本品を確実に
奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- 損傷、変形(錆、表面キズ、曲がり、汚染)等のあるもの
は使用しないこと。
- 本品を歯にあてた後に回転させること。歯にあてずに回転
させると研磨ペーストが飛び散ることがあるので注意する
こと。
- 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、
破損疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可
能性があるので十分に注意すること。

*【使用上の注意】

- 本品に使用された材料により、感作又はアレルギー反応が現
れる可能性があるため、患者に異常を認められた場合は直ちに使
用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
- 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒー
ティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わない
こと。
- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 使用後は必ず破棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学薬品を避け、清潔な場所で保管すること。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がな
いか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社歯愛メディカル
住所: 石川県能美市福島町に152番地