

P E E K プローブ

【禁忌・禁止】

本品に使用された材料により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるので、本品の原材料に対してアレルギーの既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 外観



種類	深度スケール (mm)
CP12	3-6-9-12
CP15	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

2. 原材料

作業部：PEEK

ハンドル部：ナイロン

接続部：真鍮（ニッケルメッキ）

3. 包装

1 本 / 包

【使用目的又は効果】

歯周疾患の進行を観察するため、歯周ポケットの深さを測定するために用いる。

【使用方法】

- 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程不可、121℃以下厳守、15 分。）
- 適切な種類の器具を選択する。
- 先端部を歯周ポケットに挿入し、深さを測定する。

【使用上の注意】

- 本品に使用された材料により、感作又はアレルギー反応が現れる可能性があるので、患者に異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
- 使用前に必ず【保守・点検に係る事項】に従って、洗浄・消毒・滅菌を行うこと。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・滅菌について

〔洗浄〕

- 使用後は直ちに医療用洗剤とブラシ等を使用して洗浄し、付着した体液、生体組織等の異物を完全に洗い落とすこと。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールはキズの原因となるので使用しないこと。

※先端マーキング部をブラシ、スポンジ等でこすり洗いをしないこと。マーキングが薄くなる場合がある。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。（必要に応じて潤滑油を塗布すること。）

〔滅菌〕

- オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程不可、121℃以下厳守、15 分。】

〔その他〕

- 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。

- 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色等の原因となることがある。

- 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地