

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN コード：70907000

スピードポリッシュ

【形状、構造及び原理等】

1. 外観

色調：グレー

性状：柔らかい固体



2. 原材料

酸化アルミニウム、ポリエチレングリコール、ダイヤモンド砥粒

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

- 歯科用電気駆動装置を低速回転させ、本材をバフ・ブラシ等に付着させる。
- 歯科用電気駆動装置を通常の回転速度に戻し、補綴物に押し当て研磨作業を行う。

【使用上の注意】

- 使用の際は、保護用の手袋を着用すること。
- 本品での研削、研磨の際には、目の損傷を防ぐため、保護メガネ等を使用すること。
- 換気の良い場所で使用すること。
- 使用後は直ちに蓋を閉めること。
- 研磨作業後は、石鹸をつけたブラシ等で十分に手指を洗淨すること。
- 他の製品と混用しないこと。

〔重要な基本的注意〕

- 本品の使用により、発疹等の過敏反応が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 皮膚に付着した場合は、すぐに石けんと流水で洗い流し、専門医の診断を受けること。
- 万一、目に入った場合は、すぐに多量の水で 15 分以上洗い流し、専門医の診断を受けること。
- 吸引した場合は、風通しの良い新鮮な空気の場所に移動し安静にすること。症状が改善しない場合は、医師の診断を受けること。

〔その他の注意〕

- 本品を使用する場所には、消火器具を備えること。
- 破棄する際は、地方自治体の条例または規則に従うこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 高温多湿を避け、直射日光が当たらない冷所で保管すること。
- 小児の手のとどかないところに保管すること。
- 容器の密閉状態を保つこと。

〔使用期限〕

包装に記載の使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地