

機械器具（67）歯科用防湿器
一般医療機器 歯科用ラバーダムフレーム JMDNコード：31849000

ハーフベンドラバーダムフレーム

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



2. 原材料

ポリアミド

3. 包装

1個 / 包

【使用目的又は効果】

ラバーダムを延伸した状態で保持するために用いる。

【使用方法等】

- 使用前に本品が滅菌済みかを確認すること。
（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程含む 134℃以下厳守。）
- フレームの突起部分にラバーダムシートを伸張させながら引っ掛け、フレーム内にダムを形成する。

【使用上の注意】

- 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 器具に対しての形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 劣化や破損、異常がみられた場合は、使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前後は、破損、ヒビやキズ等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 洗浄・消毒について

〔洗浄〕

血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールはキズの原因となるので使用しないこと。

〔滅菌〕

オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程含む 134℃以下厳守】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：Hangzhou Zhengxing Medical Apparatus Co., Ltd.

（ハンゾウ ジェンシング メディカル アパラス社）

製造国：中華人民共和国