


機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN コード：31776000
D e n オ ー ラ ル グ ラ ス ミ ラ ー

【形状、構造及び原理等】

1. 外観

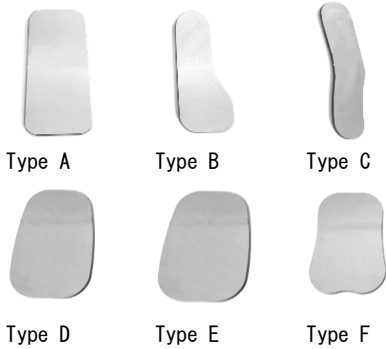

2. 原材料

ガラス

3. 包装

1 枚 / 包

【使用目的又は効果】

本品は口腔内診査のために用いる。

【使用方法等】

- 使用前にミラーが滅菌済みであることを確認する。
（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含まない、134℃以下厳守。）
- 撮影部位により適切な鏡を選択する。
- 口腔内の歯牙等を鏡の部分に反射させ、撮影する。

【使用上の注意】

- 使用前、使用後は必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと
- 誤って患者が本品を噛まないように開口器等を用いて開口状態を保持すること。
- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、清潔で乾燥した場所に保管すること。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前後は破損、ヒビ、キズ等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

2. 洗浄・滅菌について

[洗浄]

- ・血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
- ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールはキズの原因となるので使用しないこと。

[滅菌]

オートクレーブ滅菌可。【オートクレーブ温度、乾燥工程を含まない、134℃以下厳守】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

[その他]

- 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると変色等の原因となることがある。
- 塩素系消毒剤は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Hangzhou Zhengxing Medical Apparatus Co., Ltd.

（ハンゾウ ジェンシング メディカル アパラス社）

製造国：中華人民共和国