

クリアミラー D e n

【形状、構造及び原理等】

1. 外観

本品には寸法、鏡面のタイプが異なる複数種がある。

代表例：RS-M-41-0S



2. 原材料

ミラー：サファイアクリスタルガラス

ハンドル：アルミニウム

3. 包装

1 本 / 包

【使用目的又は効果】

口腔内診査又は圧排に用いる。

【使用方法等】

- 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。
（オートクレーブ滅菌可。134℃以下厳守。）
- 口腔内の状態を観察・検査する。

【使用上の注意】

- 使用前に必ず【保守・点検に係る事項】に従って、洗浄・消毒・滅菌を行うこと。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 誤って患者が本品を噛まないように、開口器等を用いて開口状態を維持すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前・使用後は、破損、ヒビ、大きな腐食又は、ミラー一部の曇り等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 洗浄・滅菌について

[洗浄]

- 使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。（必要に応じて潤滑油を塗布すること。）

[滅菌]

- オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ滅菌可。134℃以下厳守。】
※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

[その他]

- 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Foshan Ruibang Xinsheng Medical Instrument Co., Ltd

（フォーシャン ルイバァン シンシャン メディカル インストルメント社）

製造国：中華人民共和国