

機械器具(25) 医療用鏡  
一般医療機器 歯鏡 JMDNコード: 31776000

## グッドグリップミラーⅡ

### 【形状、構造及び原理等】

#### 1. 外観

本品は鏡面が片面タイプと両面タイプの2種類がある。



#### 2. 原材料

ガラス、ポリカーボネート

#### 3. 包装

10本 / 包

### 【使用目的又は効果】

本品は口腔内診査のために用いる。

### 【使用方法等】

1. 本品が滅菌済みか確認する。(オートクレーブ滅菌可。121℃以下厳守、乾燥工程不可。)
2. ハンドルを把持し、使用する。

### \* 【使用上の注意】

1. 患者ごとに【保守・点検に係る事項】に記載する方法及び条件で、洗浄等の処理を行った上で滅菌すること。
2. 子供等の診療・治療時においては、開口器等を用いて開口状態を維持すること。本品を噛み、口腔内で破損し、怪我をするおそれがある。
3. 破折等による誤飲のおそれがあるので、以下は行わないこと。
  - ① 本品に対する曲げ・切削・加圧等
  - ② 粗雑な扱い(キズをつける・落下させる・強い衝撃を与える等)
4. 薬液等が付着した場合、腐食するおそれがあるので速やかに清拭すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

### \* 【保守・点検に係る事項】

1. 以下の方法及び条件で、患者ごとに、洗浄等の処理を行った上で滅菌すること。

#### 【洗浄】

・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるため使用しないこと。

※クレンザー(磨き粉)、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

#### 【滅菌】

・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、121℃以下厳守、乾燥工程不可。】

### 【その他】

- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する(錆びる)ことがある。
- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることもある。
- ・使用前に汚れ、破損、ヒビ、キズ、腐食又はミラー部の曇り等がないか点検すること。

### 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社歯愛メディカル

住所: 石川県能美市福島町に152番地

製造業者: ROCODENT INTERNATIONAL LIMITED

(ロコデントインターナショナル社)

製造国: 中華人民共和国