

io コネクト

【形状、構造及び原理等】

1) 外観

ioConnect	Screw
	
Cap	Driver
	

2) 原材料

ioConnect、Screw、Cap：チタン合金
Driver：トリムライト

【使用目的又は効果】

本品は、歯科インプラント用の補綴物の設計・製作に用いる器具で、口腔内でのインプラント埋入位置情報を歯科用 CAD/CAM システムに再現するために使用する。

【使用方法】

[使用前の準備]

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認する。
(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 132℃以下厳守)

[使用方法]

- 1) 取扱説明書の手順に従い、本品をアバットメントに取付け口腔内スキャンを行う。
- 2) スキャン完了後は本品を取り外し、適切な洗浄・消毒・滅菌を行うこと。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレスチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- 4) 本品の使用はインプラントの知識を有する歯科医師の指導・指示のもと、作業、操作を行うこと。

【保管方法及び有効期間】

- 1) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- 2) 乾燥させた状態で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前・使用後は、破損、ヒビ、大きな腐食がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 2) 本品の清掃、消毒、滅菌は下記の通り。

[洗浄]

・使用後は防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。（必要に応じて潤滑油を塗布すること。）

・包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。

[滅菌]

・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 132℃以下厳守】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

[その他]

・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。

・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：TRUABUTMENT INC.
(トゥルーアバットメント社)
製造国：アメリカ合衆国