

機械器具（60）歯科用エンジン  
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット JMDN コード：34713000

## 歯科用 CAD/CAM マシン CORiTEC one

### 【形状、構造及び原理等】

#### 1. 外観



### 【保守・点検に関わる事項】

1. 詳細については取扱説明書を参照すること。
2. 必ず定期点検を行うこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル  
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Imes-icore GmbH（アイミスアイコア社）  
製造国：ドイツ

#### 2. 仕様

サイズ：422 mm×644 mm×556 mm  
重量：約 75kg  
電氣的定格：AC 100-230V 50/60Hz

### 【使用目的又は効果】

技工所又は技工室に設置して歯科修復物のコンピュータ支援製造（CAM）に用いる。

### 【使用方法等】

※詳細な使用方法については、取扱説明書を参照すること。

1. 電源を入れる。
2. 加工物を取り付ける。
3. ミリングバーを取り付ける。
4. 保護ドアを閉じる。
5. 加工データを取り込み、加工を開始する。
6. 加工完了後、加工物を取り外す。
7. 電源を切る。

### 【使用上の注意】

1. 精密機械のため、取扱いには十分に注意すること。
2. 機器の改造や分解をしないこと。
3. 異常を確認した場合は、直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜くこと。
4. 使用しないときは電源コンセントを抜いておくこと。
5. 可燃物のある場所に設置しないこと。
6. 振動のない安定した場所に設置すること。
7. 水のかからない場所に設置すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光を避け、水のかからない場所に保管すること。
2. 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。
3. 傾斜、振動、衝撃のない安定した場所に保管すること。