

機械器具（09）歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研削器材 JMDNコード：70908000

## CORiTEC one 用ミリングバー

### 【形状、構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造



#### 2. 原材料

タングステンカーバイド

### 【使用目的又は効果】

歯科材料を切削・研削加工するために用いる。歯科用 CAD/CAM システムの切削加工機に装着して使用する。

### 【使用方法等】

#### 【使用方法】

※使用方法については併用する歯科用 CAD/CAM 装置の取扱説明書を参照すること。

本品を CAD/CAM 装置に装着し、歯科用切削加工材料の加工を行う。

#### 【併用機器について】

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

販売名：歯科用 CAD/CAM マシン CORiTEC one

届出番号：17B2X10001001997

#### 【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・本品を CAD/CAM 装置に取り付けて予備運転をさせ、振れやがたつき等の異常がないことを確認すること。
- ・本品は高速回転で使用され、使用中に破折する可能性があるため十分に注意すること。

### 【使用上の注意】

1. 本品は【併用機器について】に記載の CAD/CAM 装置以外には使用しないこと。
2. 変形、破損、腐食等があるものは使用しないこと。
3. 本品の形態変更や改造はしないこと。
4. 使用中に異常振動や異音が発生した場合は、直ちに使用を中止すること。
5. 同一セットで異種材料の加工を行わないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

1. 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、さびている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：Imes-icore GmbH（アイミスアイコア社）

製造国：ドイツ