

フレキシブルマイクロミラー

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



各ミラー形状毎に 2 種類のサイズがある。

2. 原材料

ミラー：ガラス

ミラーヘッド：ステンレススチール

ハンドル：アルミニウム

3. 包装

単品：1 本 / 包

アソート：4 本（各タイプ 1 本） / 包

【使用目的又は効果】

口腔内診査を行うために用いる。

【使用方法等】

1. 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。
（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守。）
2. 口腔内の状態を観察・検査する。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず【保守・点検に係る事項】に従って、洗浄・消毒・滅菌を行うこと。
2. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 本製品を用いた処置により発疹、皮膚炎などの過敏症状又はアレルギー症状が現れた患者には、使用を中止し医師の診断を受けさせること。
5. 子供等の診療・治療時においては、開口器等を用いて開口状態を維持すること。本製品を噛み、口腔内で破損し、怪我をするおそれがある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前・使用後は、破損、ヒビ、キズ、腐食又はミラー部の曇り等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

2. 洗浄・滅菌について

[洗浄]

- ・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

[滅菌]

- ・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守。】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

[その他]

- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd

（チェンドウ サニ メディカル エクイップメント社）

製造国：中華人民共和国