

EASY カーバイトバー (HP 用)

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



2. 原材料

作業部：タングステンカーバイド

シャンク部：ステンレススチール

3. 包装

5 本 / 包

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

【使用目的又は効果】

歯科技工用ハンドピース等に装着し、金属、プラスチック、陶材、又は同種の材料を研削するために用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

1. 歯科技工用ハンドピースに装着し、試運転して振れがないことを確認する。
2. 以下の回転速度に従って被研削物の研削を行う。
※最大回転数：40,000rpm
※※推奨回転数：6,000～40,000rpm

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

1. 歯科技工用ハンドピースの取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
2. 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
3. 指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
4. 折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度な加圧での使用は避けること。
5. 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
6. 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
7. 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。

【使用上の注意】

1. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
2. 本品に用いた原材料は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食する（錆びる）ことがある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
2. オートクレーブ滅菌を行う場合は、121℃以下厳守。