

パーフェクトレジンプラガー

*【形状、構造及び原理等】

1. 外観

本体

電源ボタン

チップ



2. 原材料

本体：ABS、アルミニウム
チップ：ステンレススチール

3. 仕様

電撃に対する保護の形式：内部電源（単 6 アルカリ電池）
電撃に対する保護の程度：B 形装着部

4. 包装

本体、チップ（5 本）、単 6 電池 2 本 / 包
または チップ（5 本） / 包

【使用目的又は効果】

歯科用充填用コンポジットレジンに歯牙に充填、塗布するために用いる。

【使用方法等】

〔使用前の準備〕

※取扱説明書をよく読むこと。

- 取扱説明書に従って、電池を入れる。
- チップが滅菌済みかどうか確認すること。
（チップのみオートクレーブ滅菌可。135℃以下厳守。）
- チップを本体に装着する。
- 口腔外で試運転し、振れがないことを確認する。

〔使用方法〕

- 電源ボタンを押し、振動を開始させる。
- チップ先端を充填されたコンポジットレジンに接触させ、充填を行う。
- 電源ボタンを押し、終了する。

〔使用環境〕

温度：5～40℃
湿度：10～80%
気圧：75～106kPa

【使用上の注意】

- 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用補法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 粉塵や化学薬品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

〔保管環境〕

温度：-10～40℃
湿度：10～80%
気圧：75～106kPa

【保守・点検に係る事項】

※詳細については取扱説明書を参照すること。

- 取扱説明書に従い、必ず定期点検を行なうこと。
- しばらく使用しなかった機器を再使用する際には、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。
- 機器の分解・改造はしないこと。
- 故障した場合は、直ちに製造販売業者若しくは販売業者へ連絡すること。
- 洗浄・滅菌について

〔洗浄〕

・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※強酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるため使用しないこと。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるため使用しないこと。

〔滅菌〕

- ・チップは、オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度 135℃以下厳守】
- ・本体はオートクレーブ滅菌不可。

〔その他〕

- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

6. 本品には単 6 形以外の電池を使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Foshan Ruibang Xinsheng Medical Instrument Co., Ltd
（フォーシャン ルイバン シンシャン メディカル インストルメント社）
製造国：中華人民共和国