


機械器具（69）歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置 JMDNコード：35761000

ライトゾーン Dual

【形状、構造及び原理等】

1. 外観

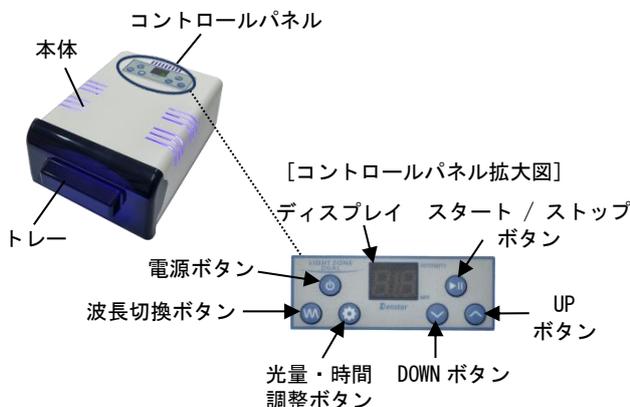

2. 仕様

寸法	L 282 mm × W 200 mm × H 107 mm
重量	1.2kg
光源	LED
波長域	400～405nm / 460～465nm
定格電圧	AC 100V～240V
定格出力	65W
周波数	50/60 Hz

3. 包装

1台、電源コード / 箱

【使用目的又は効果】

歯科技工作業において、高分子材料の光重合に用いる。

【使用方法】

【使用前の準備】

使用前に必ず取扱説明書を読むこと。

【使用方法】

- 電源コードを本体に接続し、プラグをコンセントに差し込む。
- トレーを閉じた状態で電源ボタンを押し、電源を入れる。
- トレーを引き出し、被照射物をセットし、トレーを閉じる。
- コントロールパネルで波長、光量および照射時間を設定する。
- スタート / ストップボタンを押し、照射を開始する。
- 照射終了後、電源ボタンを押し電源をオフにし、被照射物を取り出す。

【使用環境】

温度：5～40℃

湿度：50～80%

【使用方法に関連する使用上の注意】

照射時間は被重合物の使用書に従うこと。

【使用上の注意】

- 光源を直視しないこと。
- 傾斜、振動、衝撃等のない安定した場所に設置すること。
- 本品の解体や分解、改造はしないこと。
- 本体底部にある換気口をふさがないこと。
- 電気暖房機器の近くに設置しないこと。

- 水のかからない場所に設置すること。
- 異音、悪臭、煙が出た場合は、直ちに電源コードを抜いて作業を中止すること。
- 長期間使用しない場合は、電源コードを抜くこと。

【保管方法及び有効期間】

- 水のかからない場所に保管すること。
- 気圧、温度、湿度、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生じる恐れのない場所に設置すること。
- 傾斜・振動・衝撃など安定状態に注意して保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- 取扱説明書に従い、使用前に点検を行うこと。
- 必ず定期点検を行うこと。
- しばらく使用しなかった機器を再使用する時は、使用前に必ず機器が正常かつ安全に動作することを確認すること。
- 故障した場合は、直ちに製造元若しくは製造販売元へ連絡を行い修理すること。
- 使用後は本品を清掃すること。直接水をかけたり、化学洗浄剤の使用は避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：Denstar Co., Ltd.（デンスター社）

製造国：大韓民国

取扱説明書を必ずご参照ください。