

機械器具（36） 医療用ピンセット  
一般医療機器 ピンセット JMDNコード：35079001

## ドゥペーキー鑷子 SG

## 【形状、構造及び原理等】

## 1. 外観



## 2. 原材料

ステンレススチール

## 3. 包装

1本 / 包

## 【使用目的又は効果】

皮膚や組織、異物及び消毒綿等を保持するために用いる。

## 【使用方法等】

- 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。  
（オートクレーブ滅菌可。134℃以下厳守。）
- 先端部を開閉し、使用する。

## 【使用上の注意】

- 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 本製品を用いた処置により発疹、皮膚炎などの過敏症状又はアレルギー症状が現れた患者には、使用を中止し医師の診断を受けさせること。

## 【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

## 【保守・点検に係る事項】

- 使用前後は、破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 洗浄・滅菌について

## [洗浄]

- 使用後は防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。  
※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

## [滅菌]

- オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ滅菌可。134℃以下厳守。】  
※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

## [その他]

- 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル  
住所：石川県能美市福島町に152番地製造業者：SURGICON(Pvt)Limited（サージコン社）  
製造国：パキスタン