

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN コード：70907000

EVE ダイアセラミックペースト

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



性状：ペースト

2. 原材料

ダイヤモンド砥粒、ポリエチレングリコール、溶融アルミナ、
他

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

1. 歯科用電気駆動装置に装着したパフ、ブラシ等に、本品適量を付着させる。
2. 補綴物に押しあて研磨作業を行う。

【使用上の注意】

1. 本品での研磨の際には、目の損傷を防ぐため、保護めがね等を使用すること。万一目に入った場合は、こすらず直ちに水で十分洗い流すこと。
2. 本品での研磨の際には、粉塵による人体への影響を避けるため、防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。
3. 使用後は直ちに蓋を閉めること。
4. 他の製品と混用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：EVE Ernst Vetter GmbH
(イーブ アーンスト ベッター社)

製造国：ドイツ