

Ci コットンバフ

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

HP 用



カラー：イエロー、ホワイト

2. 原材料

作業部：コットン

軸部：ステンレス鋼

3. 包装

20 本 / パック

【使用目的又は効果】

補綴物の研磨に用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

本品を歯科用電気駆動装置に装着し、補綴物等の研磨を行う。

※最大回転数：20,000rpm 以下厳守

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

1. 指定の回転数を超えて使用しないこと。
2. 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
3. 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
4. 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
5. 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
6. 回転不良・装着時のぶれや装着がゆるい場合は、使用をしないこと。
7. 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。
8. 研磨効果を十分発揮させたい時には、本品を研磨剤の種類別に分けて使用すること。

【使用上の注意】

1. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
2. ブラシ用洗浄液等に浸漬すると、本品の柔軟性を損なうことがあるので十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地