

機械器具（60）歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット JMDN コード：34713000

AccuFab-F1 3D プリンター

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



2. 仕様

寸法	330 mm × 350 mm × 575 mm
重量	23 kg
造形方式	LCD 1920px × 1080px（モノクロ）
光源	405nm UV-LED
電氣的定格	100～240V 50/60Hz 350VA
プリントサイズ	144mm × 81mm × 75mm
積層ピッチ	50μm～125μm
対応ファイル	SLP3
接続	Wifi、イーサネット、USB

【保管方法及び有効期間等】

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。
3. 傾斜、振動、衝撃のない、安定した場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書をご参照ください。

1. 必ず定期点検を行うこと。
2. しばらく使用のない本品を再度使用する際は、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Shining 3D Tech Co., Ltd.

（シャイニング スリーディー テック社）

製造国：中華人民共和国

【使用目的又は効果】

技工所又は技工室内に設置して歯科用修復物のコンピュータ支援製造（CAM）に用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

予め専用ソフトを汎用 PC にインストールし、取扱説明書の手順に従って読み込んだデータの造形を行う。

〔使用環境〕

温度：18～32℃

湿度：30～70%（結露なきこと）

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ・使用する樹脂の取扱説明書をよく読み使用すること。
- ・使用前に前回使用時の残留物や余分な樹脂がないかを確認すること。これらがある場合は、必ず取り除いてから使用すること。
- ・造形中は必ずカバーを閉じ、光源を直視しないこと。

【使用上の注意】

1. 精密機械のため、取扱いには十分に注意すること。
2. 機器の改造、分解をしないこと。
3. 換気のよい場所で使用すること。
4. 振動のない安定した場所に設置すること。
5. 可燃物がある場所、直射日光の当たる場所に置かないこと。
6. 煙や異臭がするなどの異常を確認した場合は、直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜くこと。
7. 使用時以外は電源コンセントを抜いておくこと。