

機械器具（66）歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 JMDN コード：70682000

再使用禁止

ミキシングチップ バリュー

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観

代表例：7001



2. 原材料

PP、スクリュー：POM

3. 包装

50 個 / 包

【使用目的又は効果】

歯科用印象材料等を練和又は混和するために用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

歯科用印象材料等のカートリッジ（別売）の先端に本品を取り付け使用する。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

1. 本品に適合しないカートリッジには使用しないこと。
2. 使用前に本品がカートリッジに確実に装着されていることを確認すること。
3. 破損やペースト漏れの原因となるため、ペーストを吐出時に過度の圧力をかけないこと。
4. 本品内部でペーストが硬化した後は、無理に操作しないこと。

【使用上の注意】

1. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので、絶対に行わないこと。
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 使用後は必ず廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿や直射日光を避け、粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 保管中、破損しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に変色や劣化、汚染などの異常がないか確認すること。
これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地