

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN コード：70907000

再使用禁止

ワンステップコンポシャイン

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観

CA 用



2. 原材料

作業部：酸化アルミニウム、PUA

シャンク：POM

3. 包装

40 本 / 包

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

ハンドピースに装着し、補綴物等を研磨する。

※最大回転数：10,000rpm

[使用方法に関連する使用上の注意]

1. 指定の最大回転数を超過して使用しないこと。
2. ハンドピースの取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
3. 使用前に試運転し、振れがないことを確認すること。
4. 過度の加圧や連続的な使用を避け、発熱に十分注意すること。
5. 折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
6. 安全のため、保護眼鏡を使用すること。
7. 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。

【使用上の注意】

1. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので、絶対に行わないこと。
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 使用後は必ず廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿や直射日光及び紫外線を避け、粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前に破損やヒビ、キズなどの異常がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
2. 劣化の恐れがあるため、殺菌灯（紫外線ランプ）を点灯したキャビネット等に保管しないこと。
3. オートクレーブ滅菌不可。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地