

機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN コード：31776000

再使用禁止

グッドグリップミラー I

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



カラー：ブルー、オレンジ、グリーン、ホワイト、パープル、イエロー、6 色アソート

2. 原材料

ミラー：ガラス

本体：ポリプロピレン

3. 包装

48 本（個包装） / 包

【使用目的又は効果】

口腔内診査又は圧排のために用いる。

【使用方法等】

ミラー部を口腔内に挿入し、口腔内の状態を観察・検査する。

【使用上の注意】

- 子供等の診療・治療時には、開口器等を用いて開口状態を維持すること。本製品を噛み、口腔内で破損し、怪我をするおそれがある。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので、絶対に行わないこと。
- 劣化や異常が見られた場合は、本品の使用を中止すること。
- 使用後は必ず廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿や直射日光を避け、粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前に汚れ、破損、ヒビ、キズ又はミラー部の曇り等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- オートクレーブ滅菌不可。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地