

機械器具（66）歯科用練成器  
一般医療機器 歯科用練成器具 JMDNコード：70682000

再使用禁止

EsCem ミキシングチップ

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



2. 原材料

ポリアセタールコポリマー、  
エチレン・プロピレン共重合物（スクリュウ）

【使用目的又は効果】

歯科用セメント等を練和又は混和するために用いる。

【使用方法等】

歯科用セメント等のカートリッジ（別売）の先端に本品を取り付け使用する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 本品に適合しないカートリッジには使用しないこと。
- 使用前に本品がカートリッジに確実に装着されていることを確認すること。
- 破損やペースト漏れの原因となるため、ペーストを吐出時に過度の圧力をかけないこと。
- 本品内部でペーストが硬化した後は、無理に操作しないこと。

【使用上の注意】

- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので、絶対に行わないこと。
- 劣化や異常が見られた場合は、本品の使用を中止すること。
- 使用後は必ず廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿や直射日光を避け、粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に汚れや破損、変色、劣化等の異常がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル  
住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：SPIDENT CO., LTD.（スピデント社）  
製造国：大韓民国