

歯科材料（06）歯科用印象材料
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 JMDNコード：70891000

HUGE アルファラボ

【形状、構造及び原理等】

1. 外観及び性状

性状 ペースト状

色調 ベース：ブルー（Shore A = 80）、
ライトブルー（Shore A = 85）

キャタリスト：ホワイト



2. 原材料

二酸化ケイ素、ビニルシリコンオイル、白金触媒、他

3. 仕様

混合比	1：1
練和時間	30秒
操作時間	1分30秒
硬化時間	8分
ショアA硬度	80 / 85

4. 包装

ベース、キャタリスト 各5kg又は各450g、
計量スプーン 2本 / 包

【使用目的又は効果】

シリコン等の合成ゴムを主成分とする印象材で、複模型等の作成に用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

※練和時間、操作時間、硬化時間は下表を参照すること。

- 付属の計量スプーンを用い、ベースとキャタリストを1:1の割合で計り取る。
- ベースとキャタリストを、色ムラがなく均一な色調になるまで練和する。
- 練和物を模型等に圧接し、硬化させる。

練和時間	30秒
操作時間	1分30秒
硬化時間	8分

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 使用後は直ちに容器のふたをしっかりと閉めること。ベースとキャタリストのふたを入れ替えないこと。
- 計量スプーンは、ベースとキャタリストで各々専用のものを使用し、入れ替えて使用しないこと。
- 本品が衣服に付着すると除去できないため、付着させないように注意すること。
- 硬化遅延を起こすおそれがあるため、本品を取り扱う際にはラテックス製手袋を使用しないこと。ラテックス製品に触れた手、模型等を介した間接的な接触でも硬化遅延を起こすことがあるため、注意すること。
- 操作時間、硬化時間は、温度や湿度等により変化することに留意すること。
- 本品と接触する模型等の表面は、あらかじめ油分や汚れ、水分を除去し、乾燥させてから使用すること。

【使用上の注意】

- 容器内で硬化するおそれがあるため、ベースとキャタリストが互いに接触、混入しないよう注意すること。
- 他の製品と混用しないこと。
- 使用中にかゆみや発疹、皮膚炎等の過敏症状又はアレルギー症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し医師の診断を受けること。
- 保護手袋（ラテックス製を除く）を着用し、皮膚への接触を避けること。誤って皮膚に触れた場合は、石鹸と流水で良く洗うこと。
- 本品を目に入れないよう注意すること。万一目に入った場合はすぐに大量の水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ふたをしっかりと閉めて保管すること。
- 高温多湿や直射日光を避け、5～25℃で保管すること。

[使用期限]

容器に記載されている使用期限（2年）までに使用すること。
（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：Shandong Huge Dental Material Corporation

（シャンドン ヒュージ マテリアル コーポレーション）

製造国：中華人民共和国