

機械器具（66）歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 JMDNコード：70682000

再使用禁止

コアチップ スモール

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



2. 原材料

ポリプロピレン

3. 包装

100本 / 包

【使用目的又は効果】

ミキシングチップの先端に装着し、練和又は混和された歯科材料を吐出するために用いる。

【使用方法等】

ミキシングチップ（別売）の先端に本品を差し込んで装着し、歯科材料の吐出を行う。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

1. 本品がミキシングチップに確実に装着されていることを確認してから、歯科材料の吐出を行うこと。
2. 無理な力や角度で装着を行わないこと。
3. 歯科材料の吐出時に圧力で本品が外れる恐れがあるため、試し出しをしてから使用し、過度の圧力をかけないこと。

【使用上の注意】

1. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので、絶対に行わないこと。
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 使用後は必ず廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿や直射日光を避け、粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に汚れや変色、破損、ヒビ、キズなどの異常がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：Shanghai Huaen Industrial Co., Ltd.
（シャンハイ ホアン インダストリアル社）

製造国：中華人民共和国