

機械器具（64）歯科用探針
一般医療機器 歯周ポケットプローブ JMDN コード：31848000

プローブ AR

【形状、構造及び原理等】

1. 外観

本品は形状の異なる複数種がある。



2. 原材料

作業部：ステンレススチール

ハンドル：シリコン

3. 包装

1 本 / 包

【使用目的又は効果】

歯周疾患の進行を観察するため、歯周ポケットの深さを測定する。

【使用方法等】

- 適切な種類の本品を選択し、本品が滅菌済みであることを確認する。（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程含む 134℃以下厳守。）
- ハンドルを把持し、作業部を歯周ポケットに挿入して深さを測定する。

【使用上の注意】

- 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので、絶対に行わないこと。
- 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿や直射日光を避け、粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前後に破損やヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 洗浄・滅菌について

【洗浄】

- 使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて洗浄すること。血液、体液等で感染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
- ※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
- ※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

【滅菌】

- オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度乾燥工程含む 134℃以下厳守】
- ※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

【その他】

- 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：AR INSTRUMED（エーアールインスツルメッド）

製造国：パキスタン