

機械器具（21）内臓機能検査用器具
一般医療機器 歯科用口腔内カメラ JMDN コード：70179000

再使用禁止（ディスポーザブルカバー）

Ez ショット SE

【禁忌・禁止】

- 埋め込み型心臓ペースメーカを装着している患者には使用しないこと。[ペースメーカ誤作動のおそれがある。]
- ディスポーザブルカバーは再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



2. 仕様

電氣的定格	DC5V 500mA
寸法 (mm)	165 × 16.5 × 16.5
重量	約 76.2 g
解像度	HD (720p)
センサー	HD Image

電撃に対する保護の程度による装着部の分類：B 形装着部

【動作環境（最小システム要件）】

PC：3.3GHz CPU、8GB RAM
OS：Windows 10
USB port：USB 2.0

3. 包装

1 セット（カメラ本体、ディスポーザブルカバー、
クレードル） / 包

【使用目的又は効果】

口腔内の情報をモニターに映し出し、診療、患者への説明等に使用する。

【使用方法等】

【使用方法】

※詳細は取扱説明書を参照すること。

- 汎用 PC 等と本品を USB ケーブルで接続すると、本品の電源が入る。
- 本品にディスポーザブルカバーを装着する。
- 本品を口腔内に挿入し、スナップショットボタンを押して画像を撮影する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 交差感染のおそれがあるため、ディスポーザブルカバーは患者ごとに必ず交換すること。
- 使用中に患者が本品を強く噛まないよう注意すること。

【使用環境】

温度：10～30℃
湿度：10～80%
気圧：800～1360hPa

【使用上の注意】

- 怪我や感電、火災の恐れがあるため、本品の分解や修理、改造は絶対に行わないこと。
- 水や液体がかからないよう注意すること。
- 本品を落下させないよう、水平で安定した場所または付属のクレードルに置くこと。落下させると内部が損傷し、過熱や火災のおそれがある。
- 高温または直射日光が当たる場所で使用しないこと。
- 換気の良い場所で使用すること。
- 感電のおそれがあるため、濡れた手で USB ケーブルを接続しないこと。
- 感電や火災の原因となるため、USB ケーブルに損傷を与えたり、過度な力を加えないこと。接続を外す際は、引っ張って外さないこと。
- 長期間使用しない場合は、USB ケーブルを汎用 PC 等から外しておくこと。
- ディスポーザブルカバーは使用后必ず廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 高温多湿や直射日光を避け、粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 水や液体がかからない場所に保管すること。

【保管環境】

温度：10～40℃
湿度：20～80%
気圧：800～1360hPa

【保守・点検に係る事項】

- 長期間使用のない本品を再使用する場合は、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
- 清掃について
 - 清掃前に USB ケーブルを汎用 PC 等から取り外すこと。
 - エタノールやアセトンを含む溶剤を使用しないこと。
 - カメラは、柔らかく繊維のでにくいフロス等でやさしく清拭すること。
 - 鋭利または先の尖った道具を使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Good Doctors Co., Ltd. (グッドドクターズ社)
製造国：大韓民国