

機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN コード：31776000
フロントサーフェイス マイクロミラー

【形状、構造及び原理等】

1. 外観

ミラーヘッドは形状の異なる複数種がある。

ミラーヘッド 12-1068-001



ハンドル



2. 原材料

ステンレススチール、ミラー部：ガラス

3. 包装

1 個 / 包

【使用目的又は効果】

口腔内診査に用いる。

【使用方法等】

1. 使用する前に本品が滅菌済みであることを確認する。
（オートクレーブ滅菌可。134℃以下厳守。乾燥工程不可。）
2. ミラーヘッドを専用ハンドルに取り付け、口腔内の診察を行う。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
2. 患者ごとに診療・治療後、速やかにミラーヘッドとハンドルを分離すること。
3. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので、絶対に行わないこと。
4. 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、環境によっては腐食（錆び）することがある。
5. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
6. 子供等の診療・治療時においては、開口器等を用いて開口状態を維持すること。本製品を噛み、口腔内で破損し、怪我をするおそれがある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿や直射日光を避け、粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前後に破損やヒビ、キズ、腐食又はミラー部の曇り等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
2. 使用前にミラーヘッドとハンドルが確実に装着されていることを確認すること。
3. 洗浄・滅菌について

[洗浄]

・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて洗浄すること。血液、体液等で感染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

[滅菌]

・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度 134℃以下厳守（乾燥工程不可）】

[その他]

・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。

・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地